

# APAVU LIETOŠANAS UN KOPŠANAS REKOMENDĀCIJAS



Pirms apavu lietošana lūdzu rūpīgi iepazīstieties ar apavu lietošanas un kopšanas rekomendācijām. Ja rodas neskaidrības par apavu lietošanu vērsieties pie sava tehniskā ortopēda.

Ortopēdiskie apavi ir individuāli izgatavoti pēc Jūsu pēdu izmēriem.

## LIETOŠANA:

- Apavu uzvilšanai lietojiet apavu lāpstiņu. Neminiet kapes (apavu aizmugurējo daļu), tā jūs paildzināsiet apavu lietošanas laiku.
- Uzvelkot un novelkot apavus, atraisiet auklas, atveriet velkro lipekļus, pilnībā atvelciet rāvējslēdzēju.
- Lietojiet apavus atbilstoši gadalaikam un laikapstākļiem: Vasaras apavus līdz 0°C, pavasara – rudens apavus līdz –5°C, ziemas apavus līdz – 30°C. Apavus, kuriem ir nošūta zole, dekoratīvās šuves vai dekoratīvi caurumoti elementi, nedrīkst lietot mitrā vai lietainā laikā, jo caur šuvēm un dekoratīvajiem caurumiem tajos nokļūst mitrums. Ļaujiet apaviem pilnībā izžūt, pirms tos no jauna uzvelciet.

## KOPŠANA:








- Reizi diennaktī ļaujiet apaviem izžūt (no mitruma un sviedriem). Apavus aizliegts žāvēt pie sildierīcēm. Būtiskas temperatūras izmaiņas veicina limes atlimēšanos un materiālu pastiprinātu bojāšanos. Žāvējot izņemiet iekšzoles, ja apavu konstrukcija ir tam piemērota.
- Vismaz reizi nedēļā notīriet apavus no dubļiem un putekļiem un citiem netīrumiem.
- Apavu kopšanai lietojiet tikai tādas kopšanas līdzekļus, kas tiem ir piemēroti.
- Uzmanību! Bieži pielietotās porolona švammes, kas piesūcinātas ar silikonu vai glicerīnu apaviem sniedz īslaicīgu spīdumu, bet ilgstoši tās lietojot, tās sausina ādu. Tās nav domātas ikdienas apavu kopšanai.
- Apavu ādas detaļas un šuves vismaz reizi nedēļā ieziediet ar atbilstošu apavu krēmu. Apavu āda kopjot kalpos ilgāk.
- Lai papildus apavus aizsargātu no mitruma ieteicams lietot mitruma aizturošu aizsarglīdzekli, īpaši šuvju vietās. Apavus apstrādāt sausus.

Apavu iekšējā ādas apdare var krāsot zeķes un kājas. Āda tiek krāsota ar dabīgām krāsvielām un tādēļ mitruma un siltuma iedarbībā tā var sākt krāsot.

## GARANTIJA

- Pēc pasūtījuma izgatavotiem ortopēdiskajiem apaviem ir divu gadu garantija.
- Garantija tiks apstiprināta tikai tad, ja tiek ievēroti lietošanas un kopšanas nosacījumi.
- Garantija neattiecas:
  - Uz ikdienas nolietojumu;
  - Uz bojājumiem, kas radušies ārējas mehāniskas iedarbības rezultātā un nav atzīstami par defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ.

## Apavu izgatavošanā pielietotie materiāli

	 ĀDA	 PĀRKLĀTA ĀDA	 TEKSTILS	 CITS MATERĪALS
				
				
				

## Papildus norādījumi:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Ja rodas kādas sūdzības vai jautājumi, sazinieties ar savu tehnisko ortopēdu!**

**Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs**

**Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 1300-13001**

T: 26600607

E: vaivaruopc@nrc.lv

W: www.nrcvaivari.lv